



Instrukcja montażu uchwytu na butelkę w Walker 12er rozmiar S




1 Miejsce montażu uchwytu na butelkę (R lub L).



2 Owiń pasek wokół rury ramy i przeciągnij go przez uchwyt.



3 Naciągnij pasek i przekręć nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby naciągnąć pasek.

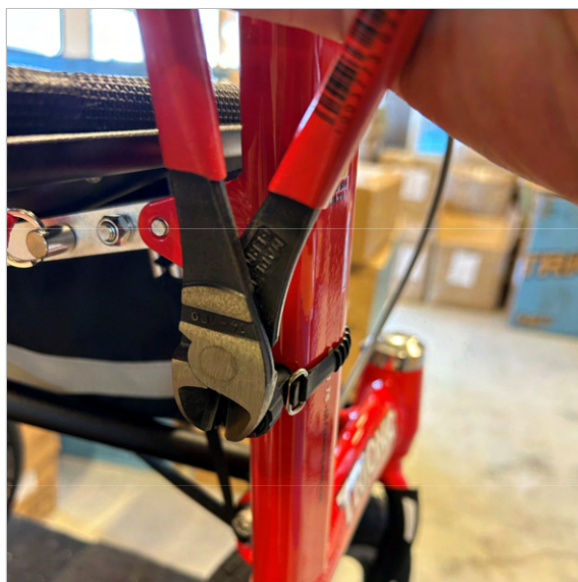

4 Odetnij nadmiar paska.



5 Zamontuj drugi uchwyt w ten sam sposób.



6 Oba uchwyty prawidłowo zamontowane na rurze ramy.



7 Przymocuj uchwyt na butelkę za pomocą dwóch śrub. „Otwór” uchwyty na butelkę powinien być skierowany na zewnątrz.



8 Uchwyt na butelkę jest teraz przymocowany do ramy. Butelkę wkłada się z boku i wyjmuje na zewnątrz.